


Registro VistaSoft 3 – VistaSoft 4

Accedemos al registro:

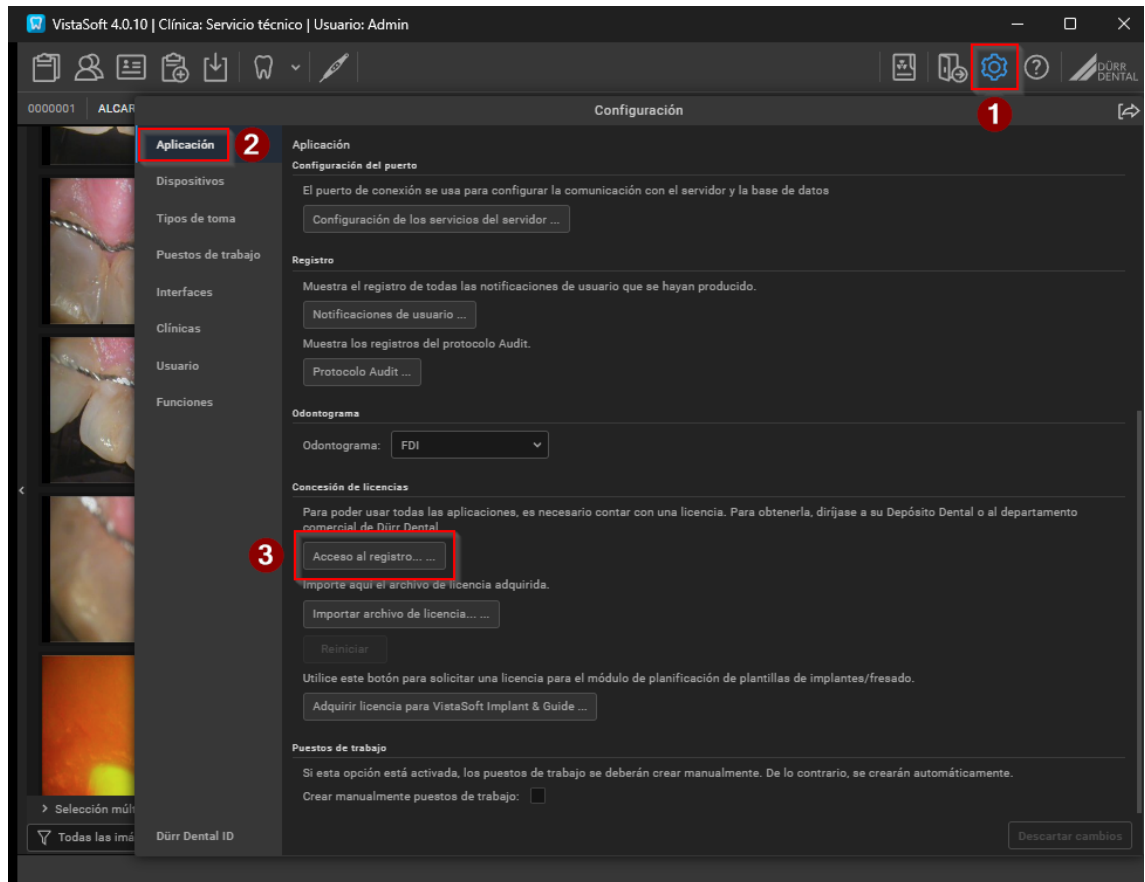

Una vez en el registro, se deberán completar los Paquetes en función del dispositivo/s adquirido/s.

Radiografía 2D VistaSoft

Si usted ha adquirido un escáner VistaScan, un sensor VistaRay o un panorámico digital VistaPano S

Radiografía 2D y 3D VistaSoft

Si usted ha adquirido un CBCT VistaVox S

VistaSoft Connect

Activado si planea usar el equipo de Dürr en software de terceros.

Hay que mencionar este módulo expresamente al solicitarlo por email.


VistaSoft Vídeo

Si usted ha adquirido una cámara VistaCam


En el proceso de registro, los dispositivos deben permanecer conectados y encendidos, los números de serie serán detectados automáticamente.

A continuación, deberán rellenarse los datos de la clínica y el distribuidor que ha realizado la venta

Se aceptarán las 2 casillas de verificación y se añadirá un correo electrónico dónde se recibirá el archivo de licencia

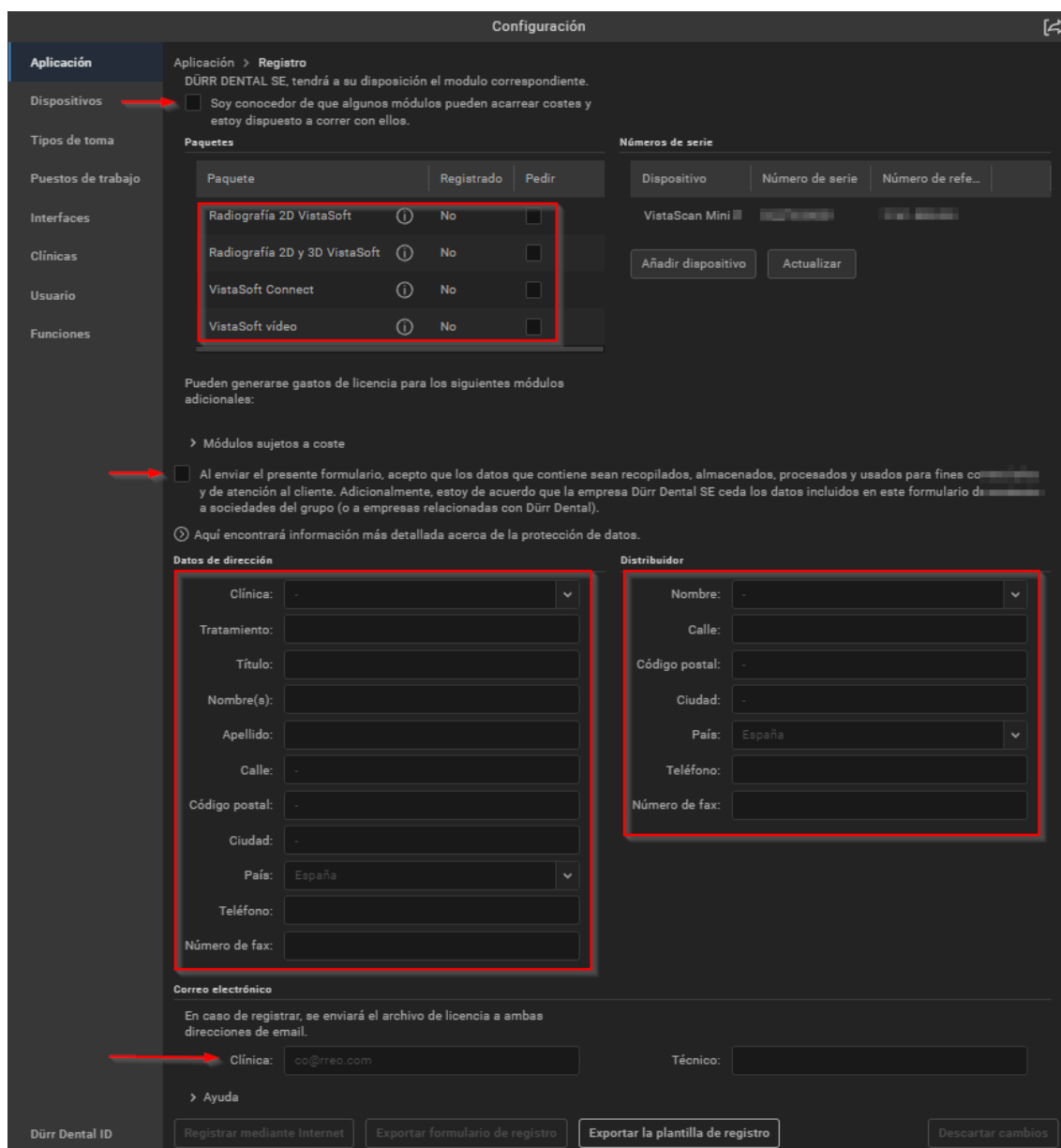


Una vez rellenos todos los campos requeridos, se iluminará el botón **Exportar formulario de registro**

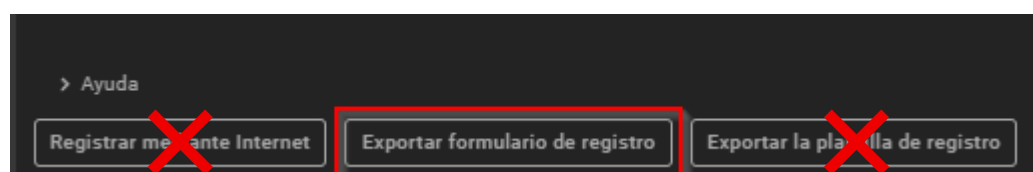

Al pulsarlo, nos exportará un archivo **regform.xml** que deberá ser enviado a registro@duerrdental.com

Recuerde, en caso de solicitar modulo VistaSoft Connect hágalo saber expresamente en el correo

Una vez recibido el archivo de extensión **.lic** entraremos en **Importar archivo de licencia...** y lo abriremos

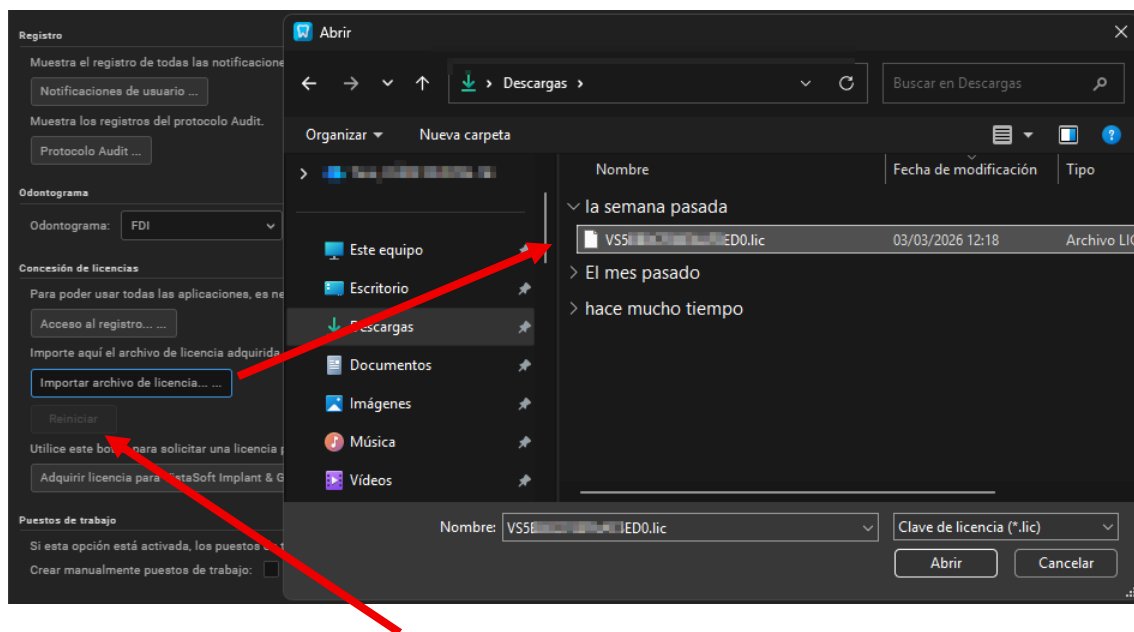

Se habilitará el botón **Reiniciar**, al pulsarlo VistaSoft se cerrará y VistaSoft quedará registrado.

VistaSoft también deberá ser reiniciado en el resto de los ordenadores.

En caso de dudas, puede contactar con su vendedor.