

Instalación VistaSoft 3 como cliente en un ordenador nuevo

Actualizado para instalaciones a partir de enero 2025 y versiones 3 mínimo

1. Requisitos:

Procesador:

Mínimo Intel Core i3 (Min 4ª Generación Q3-2013) 4 Cores

RAM:

Mínimo 4Gb

Disco duro:

Mínimo 50 Gb libres

Equipos conectados por USB:

Chipset Intel* (No se recomienda plataforma AMD)

Puerto 2.0 para equipos de antes de 2015

Tarjeta gráfica:

Mínimo 1280x1024

Sistema Operativo:

Windows 7 Pro (máximo VistaSoft 2.4.3)

Windows 8.1 Pro (solo VistaSoft 2.x)

Windows 10 Pro

Windows 11 Pro (a partir VistaSoft 3.x)

Server 2012 o superior

*No se recomienda el chipset Intel Series C200


El rendimiento puede verse afectado en caso de que el equipo no cumpla estos requisitos

Debido a su pobre rendimiento, al llevar transformador externo, se desaconseja el uso de equipos All-in-One o Intel NUC y similares en combinación con dispositivos USB como cámaras y escáneres

Los dispositivos USB deben estar conectados y encendidos en el momento de la instalación

2. Averiguar dónde está la base de datos

En otro ordenador, abrimos **VistaSoft** y entrando en **Configuración**, en **Aplicación / Configuración del puerto** veremos el nombre del servidor y el puerto

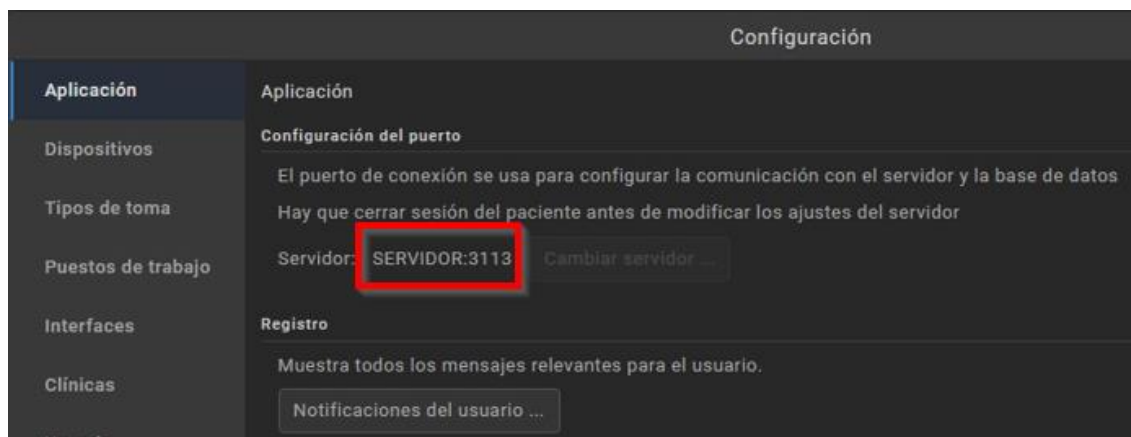

En nuestro ejemplo, el servidor se llama **SERVIDOR**, usted debe utilizar el nombre de servidor que le aparezca en su instalación


El puerto puede variar, pero generalmente será 3113

3. Acceso al servidor desde el ordenador cliente


Si tiene el disco de instalación a mano, puede saltar al **paso 5**, sino;

En el ordenador donde queremos instalar VistaSoft como cliente, tenemos que acceder a través de la red al servidor de la base de datos.


Para ello, escribimos en la lupa de Windows o en la barra de direcciones de cualquier carpeta el nombre del servidor precedido de dos barras \ \ y pulsamos Enter

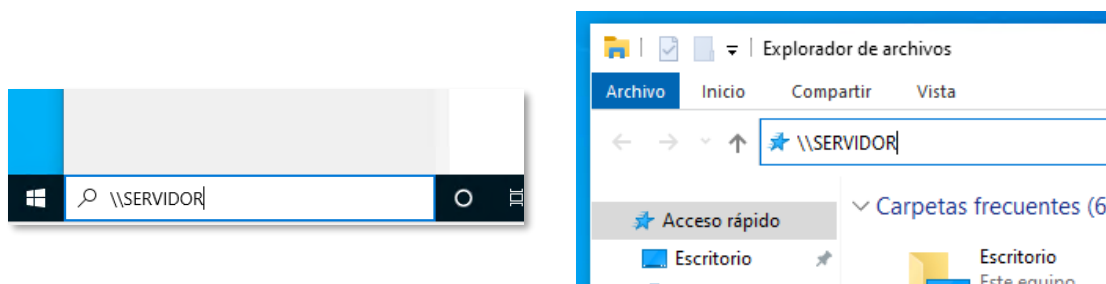


Si aparece un mensaje como éste, hágale una foto y consulte a su informático como puede resolverlo

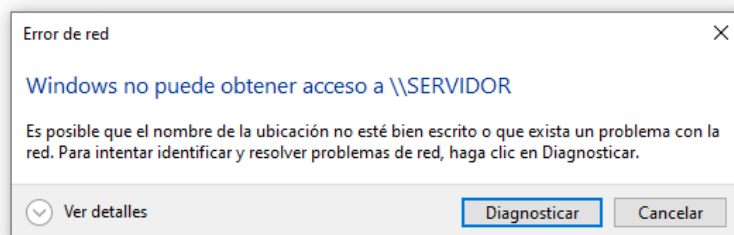

Si le aparece una ventana como esta, hágale una foto y consulte a su informático como puede resolverlo

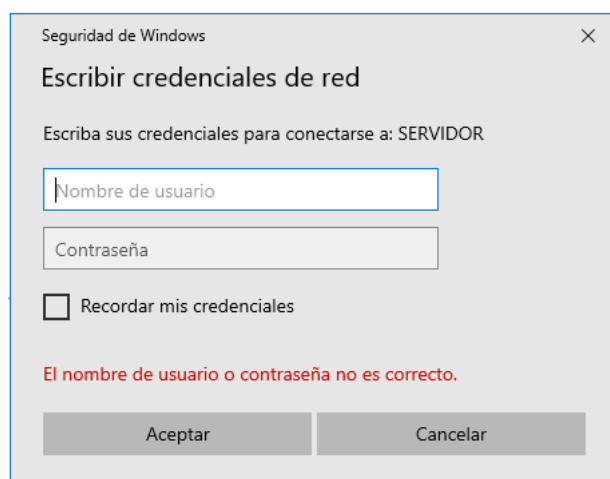


Una vez tenga acceso a su equipo **servidor**, veremos como mínimo, la carpeta VistaSoftData, entramos para ver su contenido

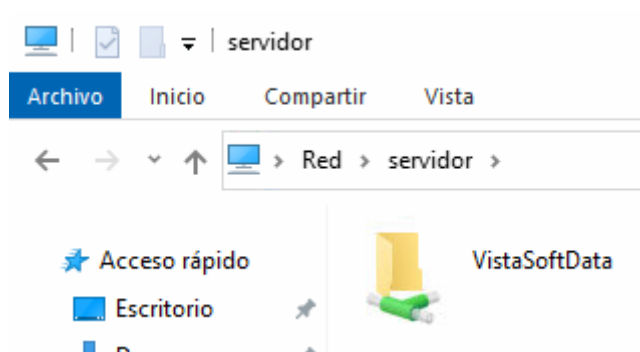


4. El disco de instalación

Dentro de la carpeta **VistaSoftData** buscaremos la carpeta **VistaSoft** con su número de versión (por ejemplo, VistaSoft 3.0.32)

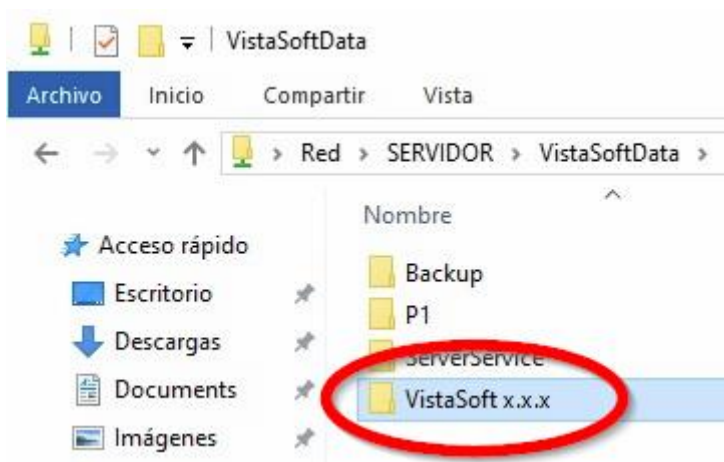


En caso de no tenerla, póngase en contacto con su Distribuidor o con el Servicio Técnico de Dürr Dental

Abrimos la carpeta del instalador y ejecutamos el archivo **Start**

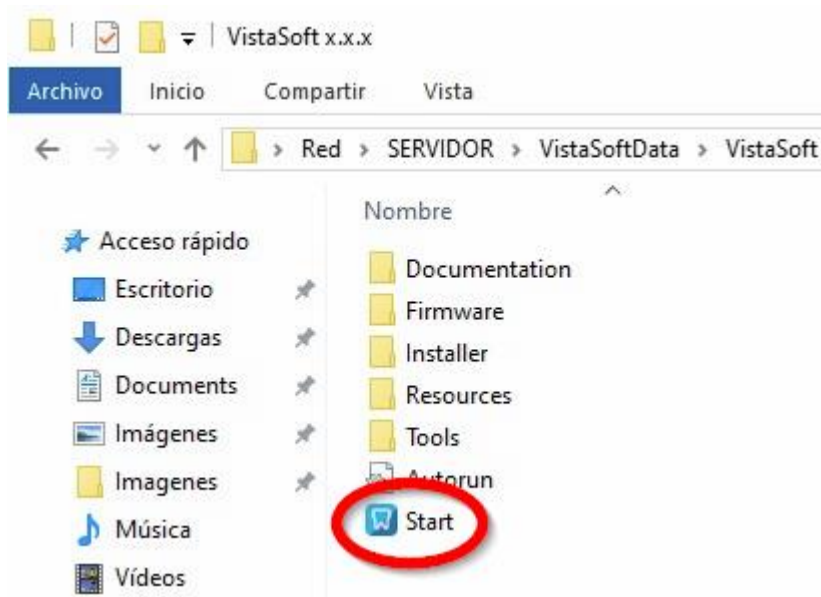


5. Instalación VistaSoft como cliente

Arrancamos el disco de instalación y aparecerá la ventana de presentación:

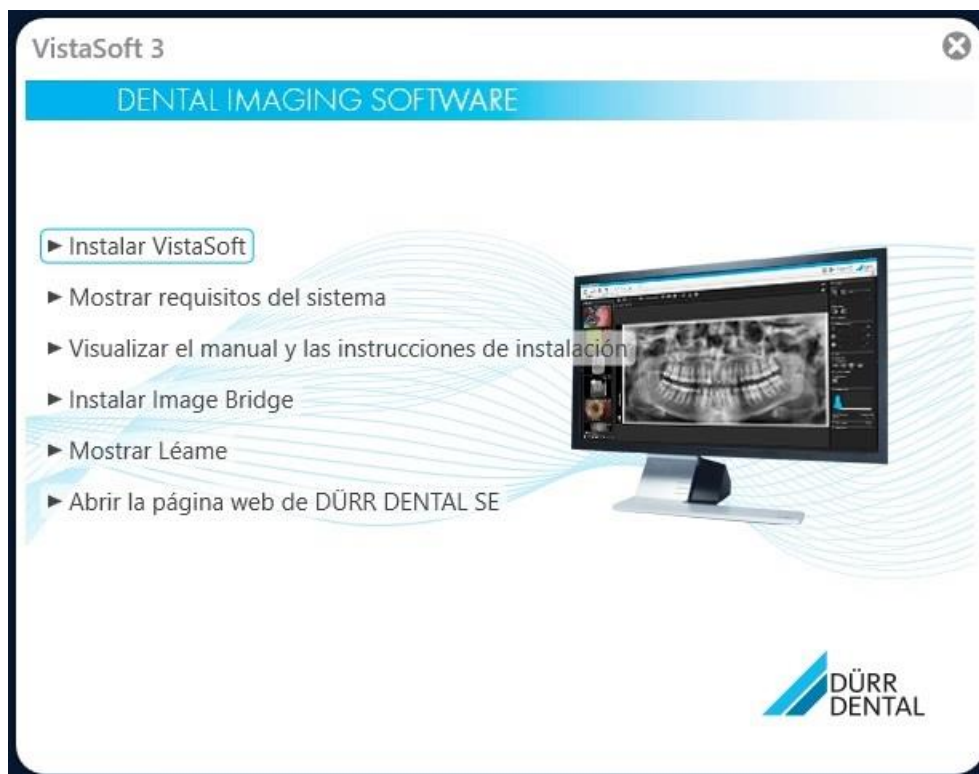

Escogemos **Instalar VistaSoft**

Seleccionamos el tipo de instalación, VistaSoft o VistaSoft Connect

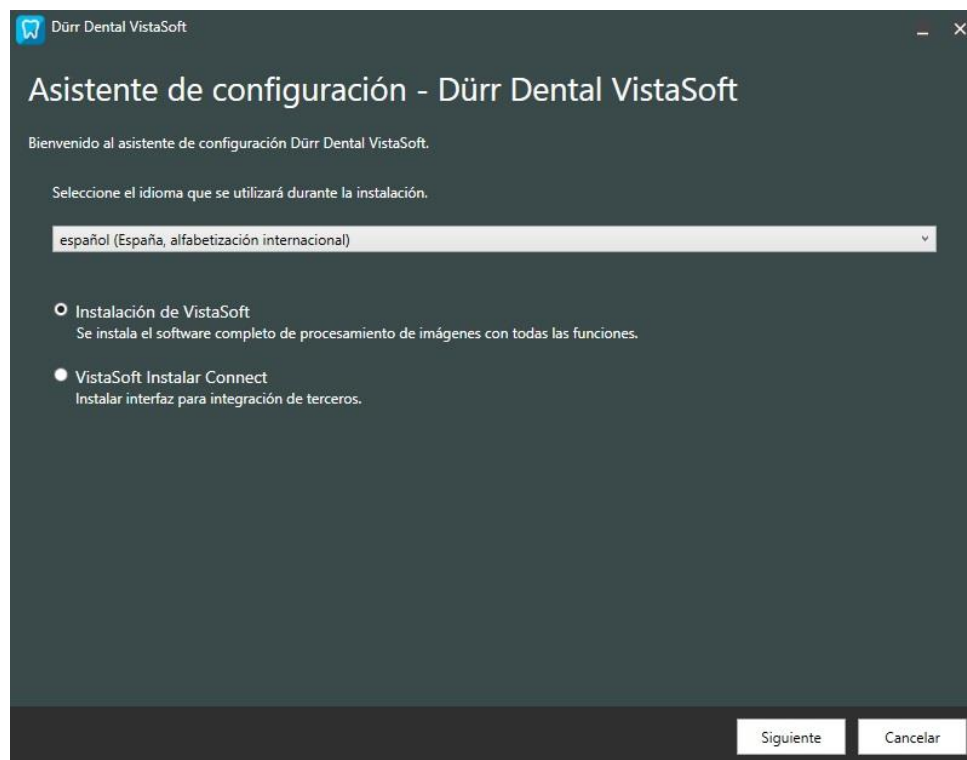

Aceptamos los términos y condiciones:

Dürr Dental VistaSoft

Lea el siguiente acuerdo. Es necesario aceptar este acuerdo antes de proseguir con la instalación.

End user licencing agreement (EULA)

between
DÜRR DENTAL SE
Hoeffigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

and
you as the User

§1 Object of the agreement

(1) The object of the agreement is the Dürr Dental VistaSoft software, Drivers and Interfaces including all pertaining program components and – if agreed – additional modules for VistaSoft software ("software").

(2) DÜRR DENTAL SE grants the User the right to use the legally acquired software for the term of this agreement and according to the following provisions. The software is protected by copyright (§§ 69 a ff UrhG [German Copyright Protection Act]).

(3) The articles 5 and 6 (Warranty and Liability) do not apply if the User acquires the software, not from DÜRR DENTAL SE directly, but, for example via a dealer for dental supplies. In such a case warranty and liability claims of the User can be asserted only vis-à-vis the direct seller.

(4) Any statutory claims against DÜRR DENTAL SE pursuant to the German Product Liability Act remain unaffected as far as they are justified. They are not the subject of this agreement.

(5) The software is maintained by DÜRR DENTAL SE at its sole discretion through updates (current versions) and upgrades (further

¿Acepta el acuerdo de licencia? ☐ Acepto el acuerdo ☒ No acepto el acuerdo

Atrás Siguiente Cancelar

Dürr Dental VistaSoft

Lea la siguiente declaración de protección de datos. Es necesario aceptar la cesión de datos antes de proseguir con la instalación.

Declaración de protección de datos

Procesaremos datos de carácter personal (a continuación "Datos") únicamente en el marco de lo necesario, así como para poner a la disposición un software funcional e intuitivo.

Según el art. 4, cifra 1 de la directiva (UE) 2016/679, es decir del Reglamento base de protección de datos (referido a continuación con sus siglas alemanas DSGVO), se considera cualquier procesamiento realizado con o sin sistemas automáticos o cualquier procesamiento relacionado a datos de carácter personal, como lo es la obtención, el registro, la organización, el almacenamiento la adaptación o modificación, la consulta, el uso, la publicación mediante transmisión, difusión u otro tipo de prestación, la comparación o el enlace, la limitación o la eliminación de estos.

Mediante la presente Declaración de protección de datos, informamos al usuario especialmente acerca del tipo, la dimensión, el objetivo, la duración y la base legal del procesamiento de datos de carácter personal, en tanto decidimos de manera independiente o conjunta con otros acerca de los objetivos y los medios del procesamiento. Adicionalmente, informaremos a continuación acerca de los objetivos de optimización, así como acerca del incremento de los módulos externos usados para incrementar la calidad de uso, en caso de que los datos sean procesados por terceros en responsabilidad propia.


La estructura de nuestra Declaración de protección de datos es la siguiente:

- I. Información propia como entidad responsable
- II. Base legal acerca del procesamiento de datos de carácter personal
- III. Informaciones acerca de la obtención y el procesamiento de datos
- IV. Ejecución del contrato
- V. Función del registro

¿Está de acuerdo con la transmisión de los datos? ☐ Estoy de acuerdo con la transmisión de los datos ☒ No estoy de acuerdo con la transmisión de los datos

Atrás Siguiente Cancelar

Nos muestra los directorios de instalación del programa (no modificar)

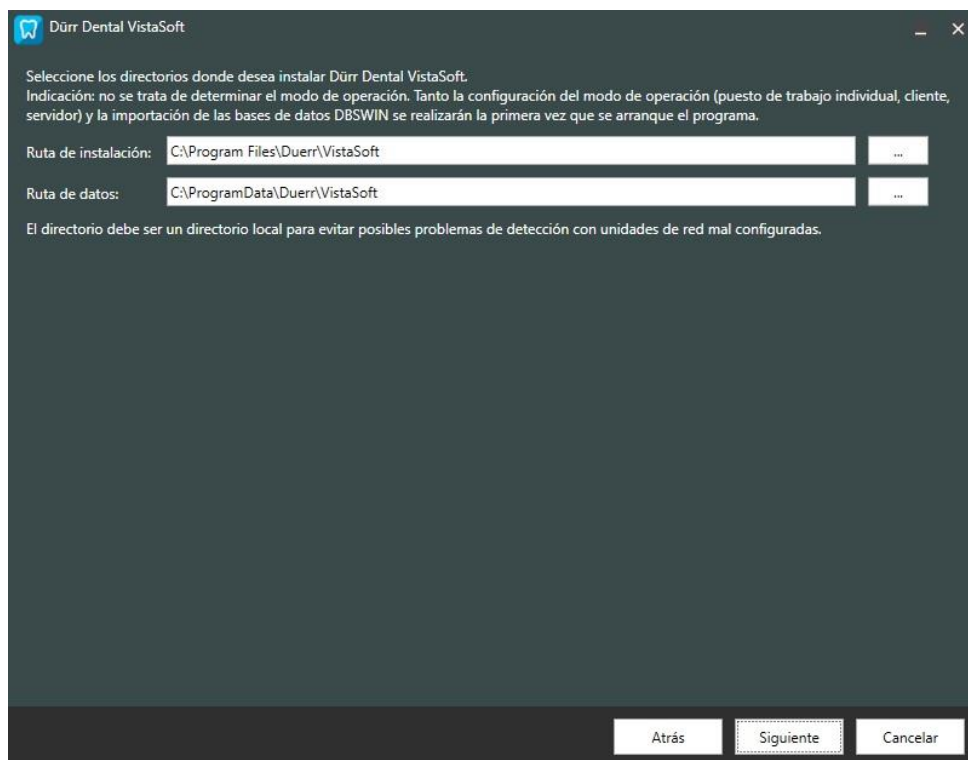


A continuación, elegimos los componentes adquiridos

VistaScan incluye todos los modelos de escáneres de Dür Dental


VistaCam incluye las cámaras iX y iX HD

VistaRay 7, Sensor intraoral con cable de Dür Dental


Dispositivos TWAIN habilita a VistaSoft para capturar imágenes con dispositivos de otros fabricantes como Acteon, Carestream, Sirona, MyRay etc

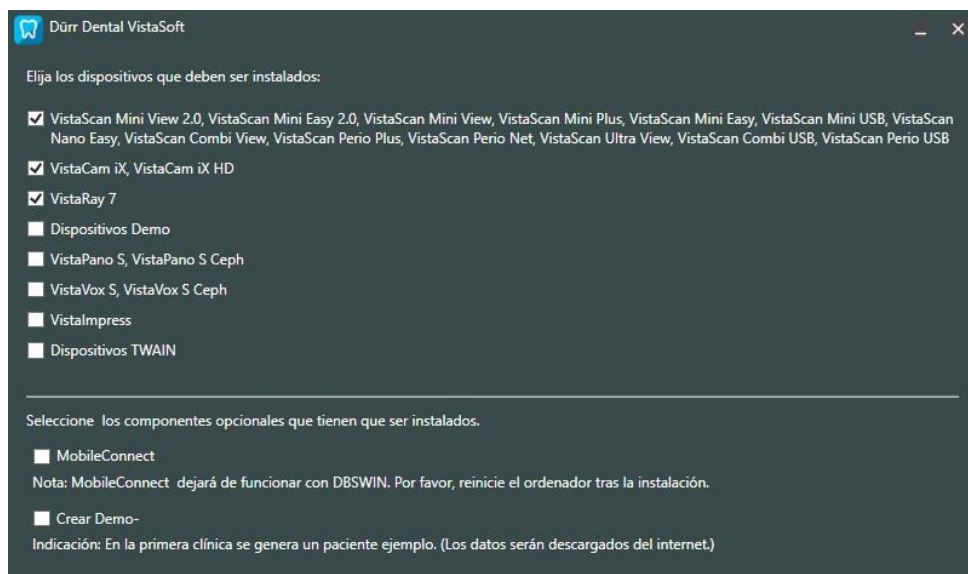

El instalador nos mostrará un resumen de la instalación que vamos a realizar

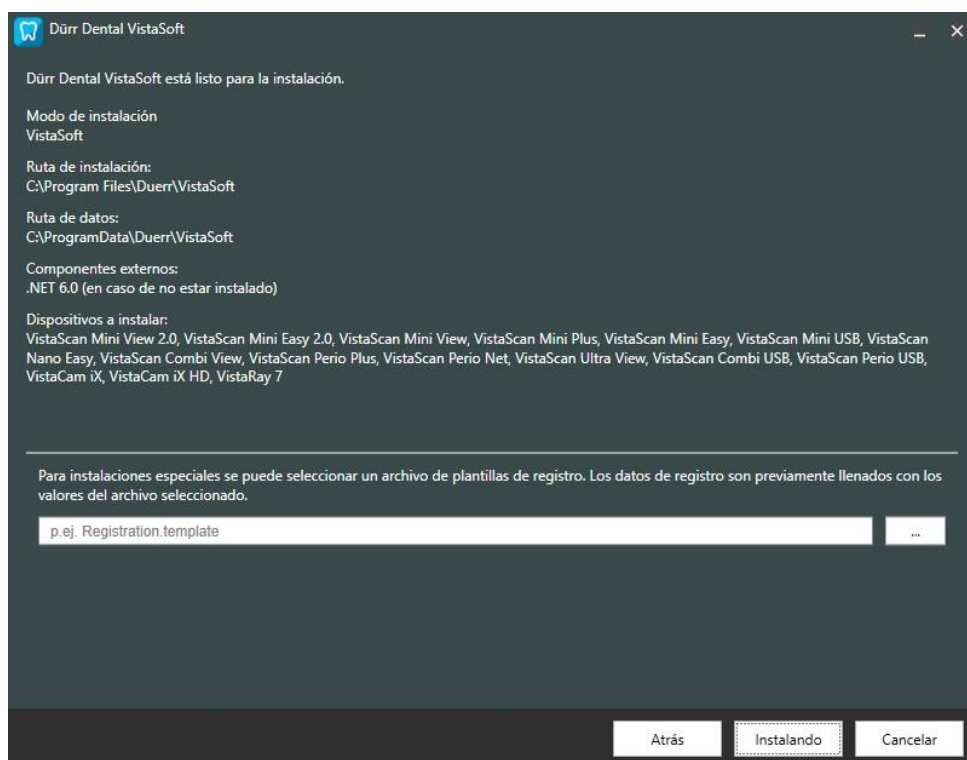


Al pulsar Instalar, dará comienzo la instalación

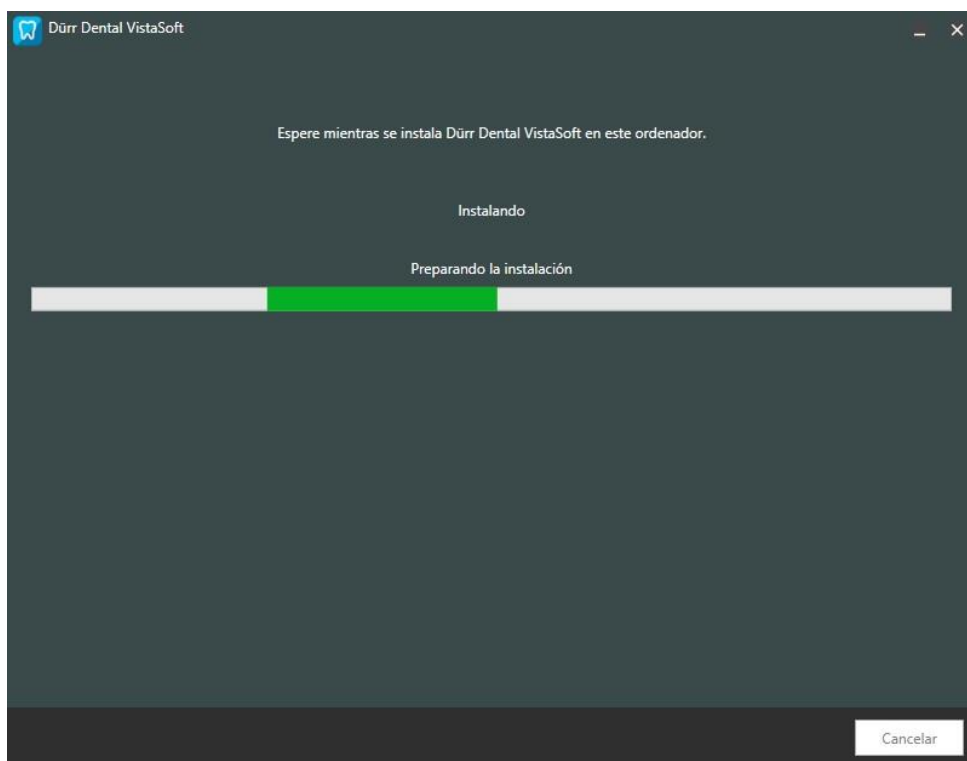


Tras unos minutos la instalación habrá finalizado y podremos abrir el programa desde el acceso directo del escritorio




En el primer arranque seleccionaremos el modo de operación -> **Cliente**

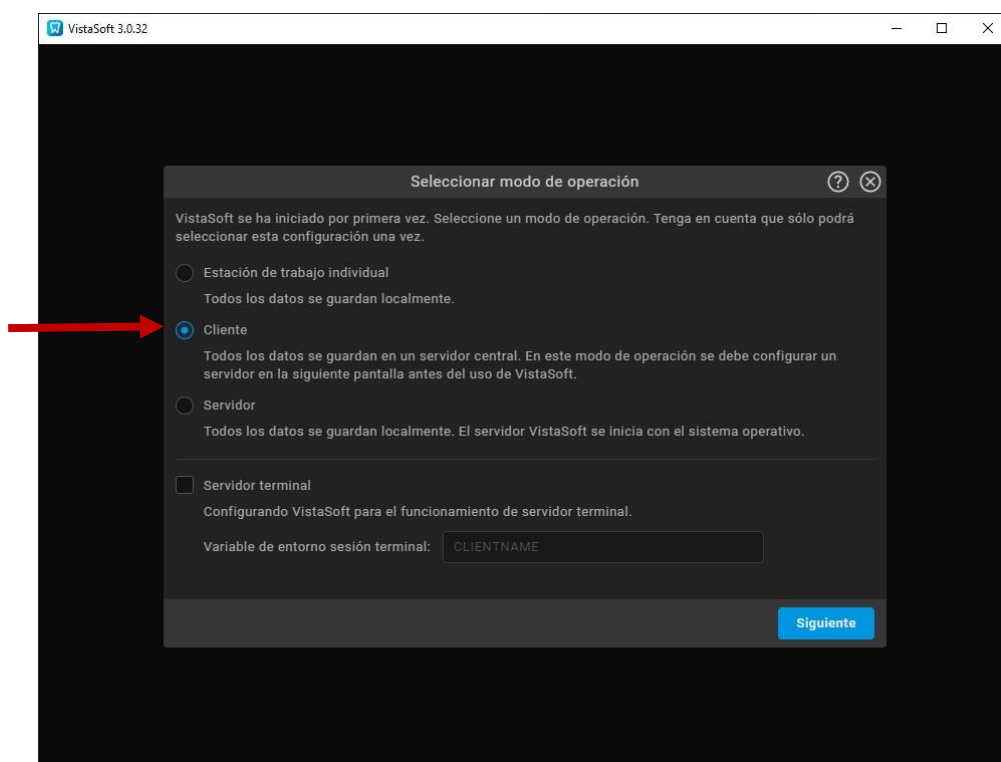

Y nos pedirá el nombre del servidor y el puerto que vimos en el punto 2

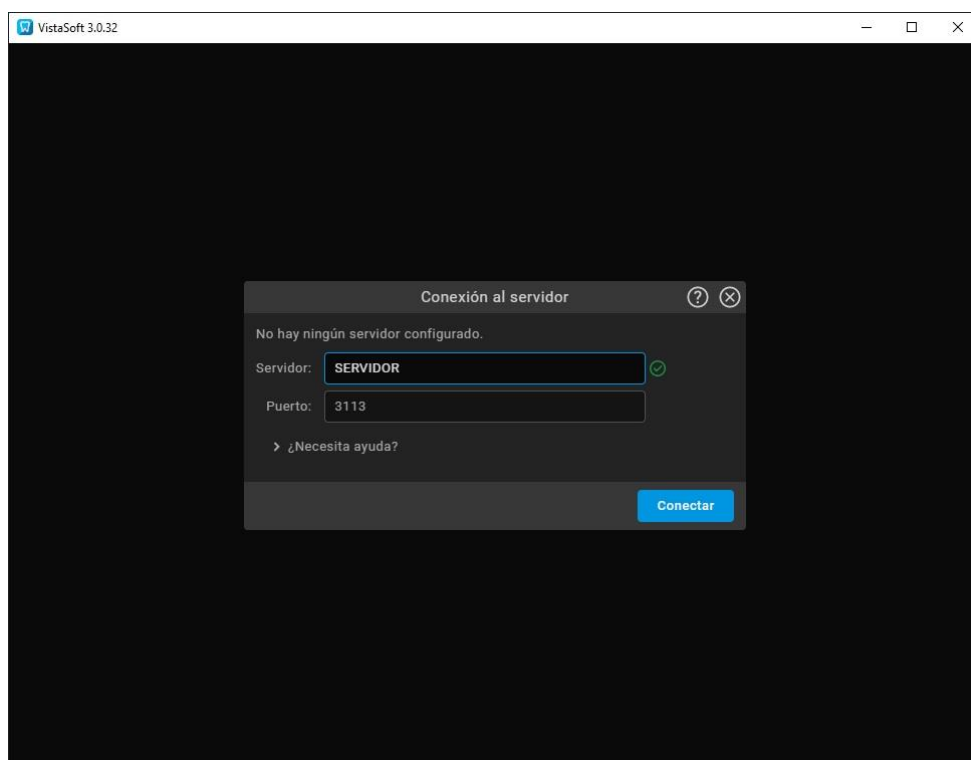

Nos pedirá Confiar en el certificado

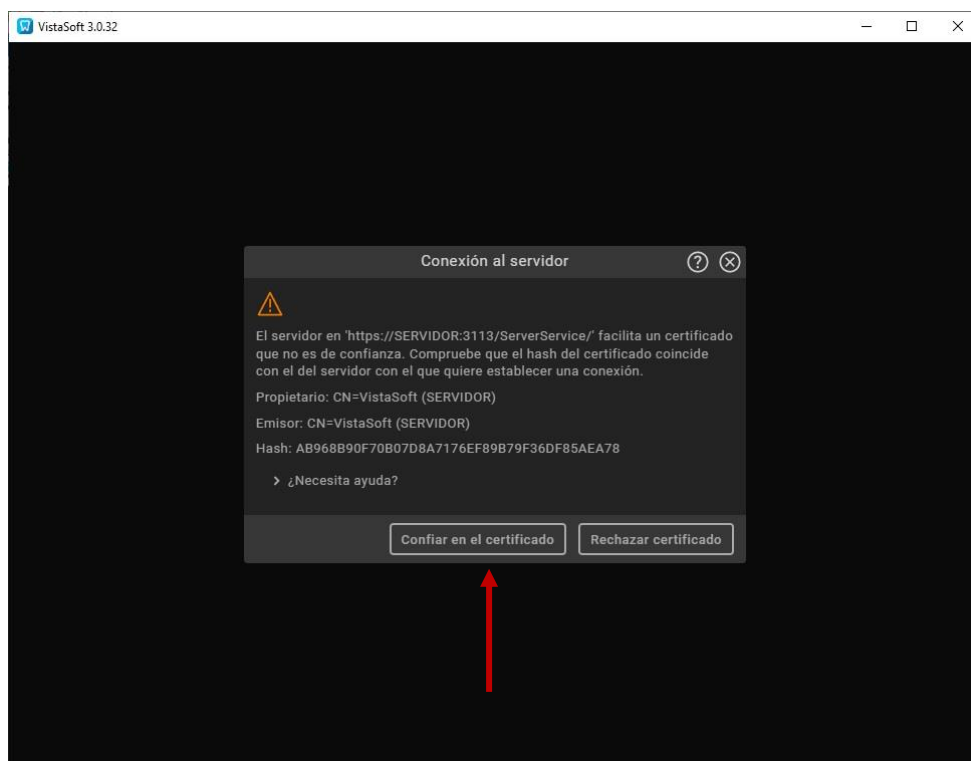

VistaSoft abrirá y podremos trabajar con él