

Instalación DBSWin como cliente en un ordenador nuevo

Actualizado para instalaciones a partir de enero 2021 y versiones 5.10 mínimo

1. Requisitos:

Procesador:

Mínimo Intel Core i3 (Min 4ª Generación Q3-2013) 4 Cores

RAM:

Mínimo 4Gb

Disco duro:

Mínimo 50 Gb libres sin base de datos

Equipos conectados por USB:

Chipset Intel* (No se recomienda plataforma AMD)

Puerto 2.0 para equipos de antes de 2015

Tarjeta gráfica:

Mínimo 1280x1024

Sistema Operativo: (No es compatible con Windows 11)

Windows 10 Pro

Windows 8.1 Pro

Windows 7 Min Home Premium

Server 2012 o superior

*No se recomienda el chipset Intel Series C200


El rendimiento puede verse afectado en caso de que el equipo no cumpla estos requisitos

Debido a su pobre rendimiento, al llevar transformador externo, se desaconseja el uso de equipos All-in-One o Intel NUC y similares en combinación con dispositivos USB como cámaras y escáneres


Los dispositivos Dürr Dental deben estar conectados y encendidos en el momento de la instalación

2. Averiguar dónde está la base de datos

En otro ordenador, entramos en Opciones – Mostrar configuración

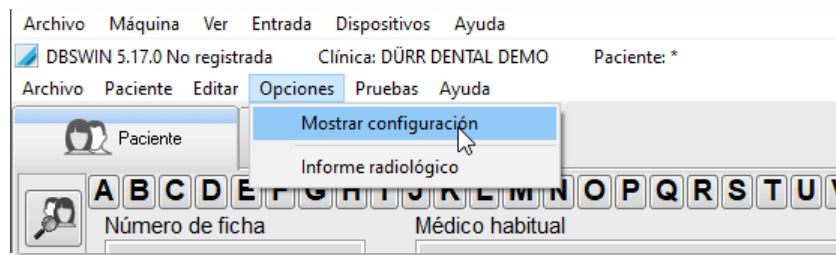

Pulsamos el icono de la casita y veremos el nombre que tiene **su servidor**

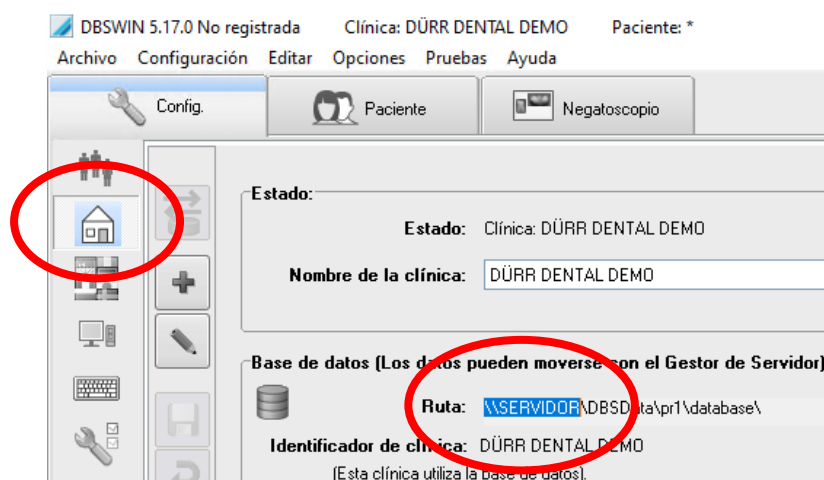


En nuestro ejemplo, el servidor se llama **SERVIDOR**, **usted debe utilizar el nombre de servidor que le aparezca en su instalación sin el resto de la ruta**


3. Acceso al servidor desde el ordenador cliente

En el ordenador a instalar, accederemos al servidor escribiendo el nombre del servidor precedido de dos barras \\ y pulsamos Enter


No ponga \DBSData, sólo el nombre de su servidor

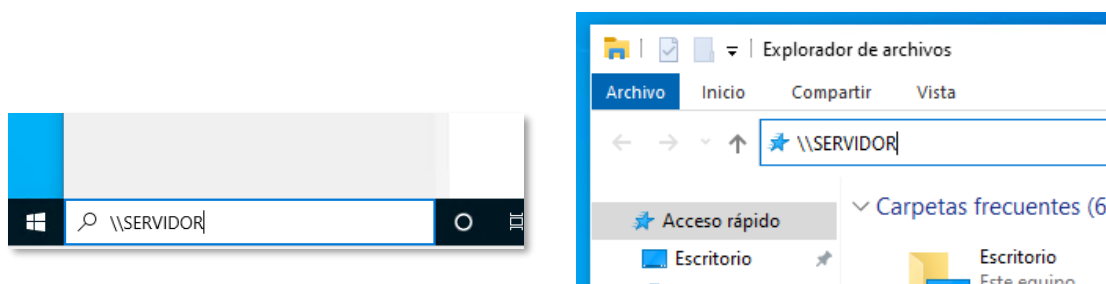

Si le aparece un mensaje como éste, hágale una foto y consulte a su informático como puede resolverlo

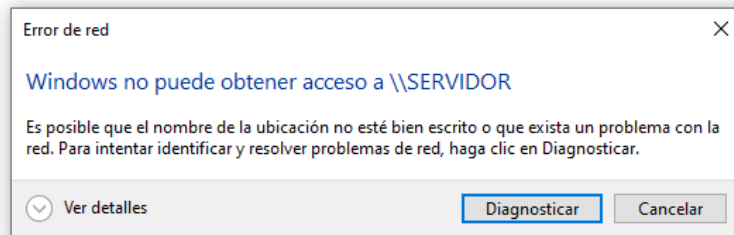


Si le aparece una ventana como esta, hágale una foto y consulte a su informático como puede resolverlo

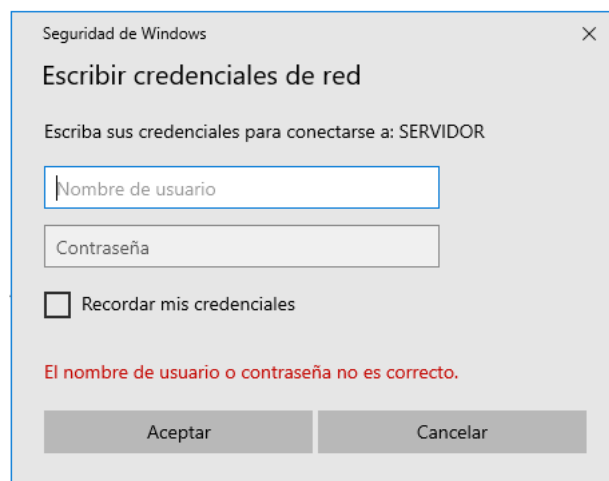


Una vez tenga acceso a su equipo **servidor**, veremos como mínimo, la carpeta DBSData

Entramos

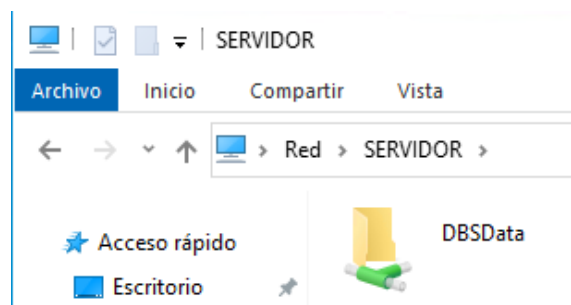


4. El disco de instalación

Dentro de la carpeta DBSData buscaremos la carpeta DBSWin con su número de versión, en el ejemplo aparece DBSWin 5.17.

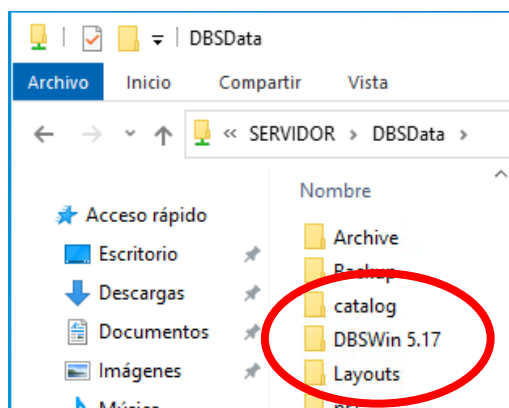

En caso de no tenerla, póngase en contacto con Dürr Dental

Abrimos la carpeta del instalador y ejecutamos el archivo CD_Start

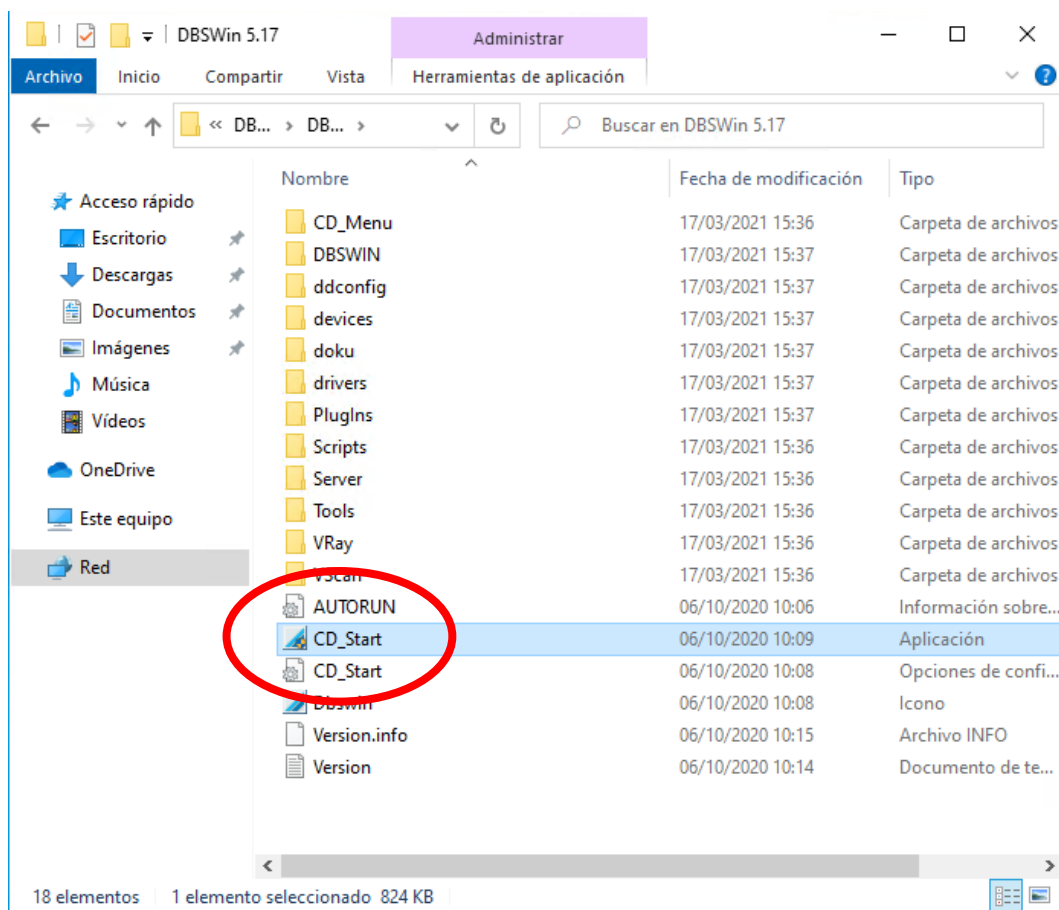

5. Instalación

En el menú de instalación hacemos clic en la línea: DBSWIN Instalación



Aceptamos para instalar DBSWIN



Se instalarán los componentes necesarios y dependiendo de su sistema, tardará más o menos en llegar al asistente de instalación


Una vez aparezca la ventana del asistente, damos a Continuar




Aceptamos los términos y Continuamos




Marcamos Instalación DBSWin

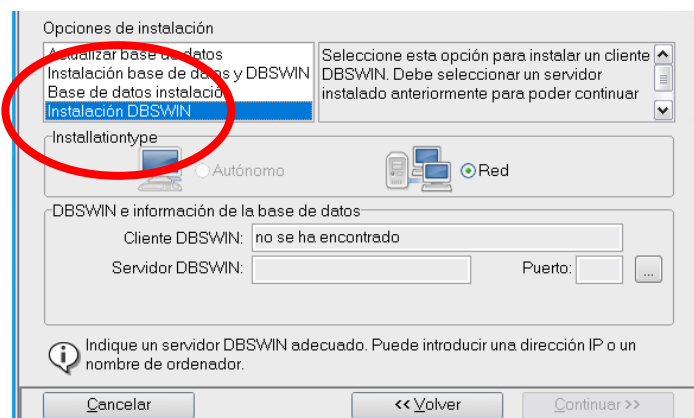


Pulsamos en el botón de los 3 puntos para indicarle **el nombre de su servidor que averiguamos en el punto 2 de este manual**

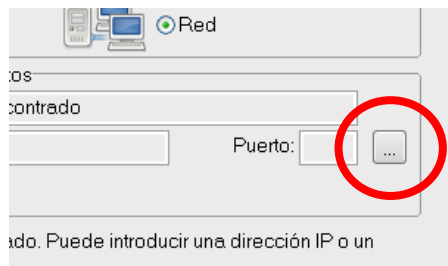

Escribimos el nombre de **su servidor** y le damos a Buscar

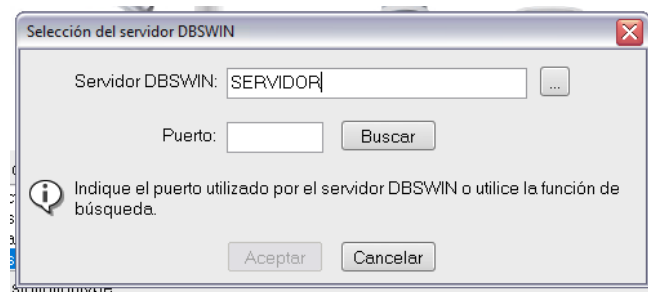

Un mensaje le indicará que ha encontrado **su servidor**

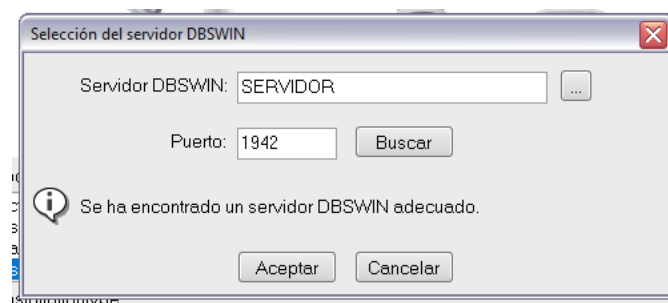

Aceptamos y pulsamos Continuar para acceder a la siguiente pantalla



En la siguiente ventana, **sólo deberemos activar los módulos necesarios** en función del dispositivo que utilizaremos en este ordenador

Módulo de Video si en ese equipo usaremos una cámara Dürr VistaCam




Módulo de Radiografía, Se activa si en este equipo usaremos un VistaScan o un VistaRay para adquirir imágenes ya sea por USB o Red




Si no se conectará ningún dispositivo, es recomendable desactivar los módulos

En caso de usar un VistaScan por USB o un VistaRay debe estar conectados antes de lanzar el instalador

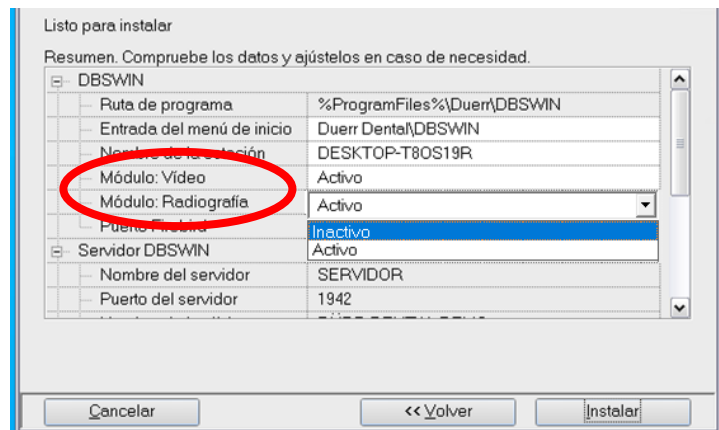


Una vez configurado, pulsamos Instalar


La instalación da comienzo y suele tardar unos 5 -7 minutos

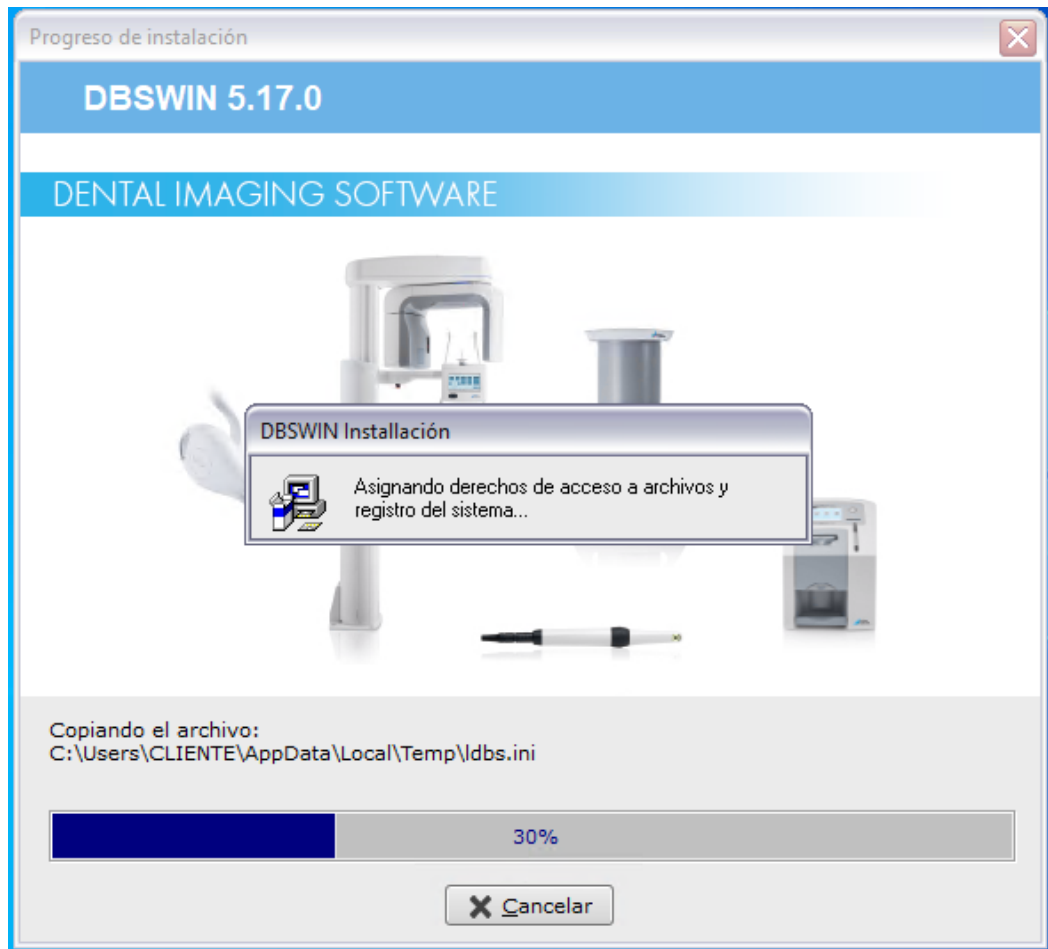

Durante la instalación, nos aparecerá alguna ventana del Firewall de Windows (siempre deberemos Permitir Acceso)

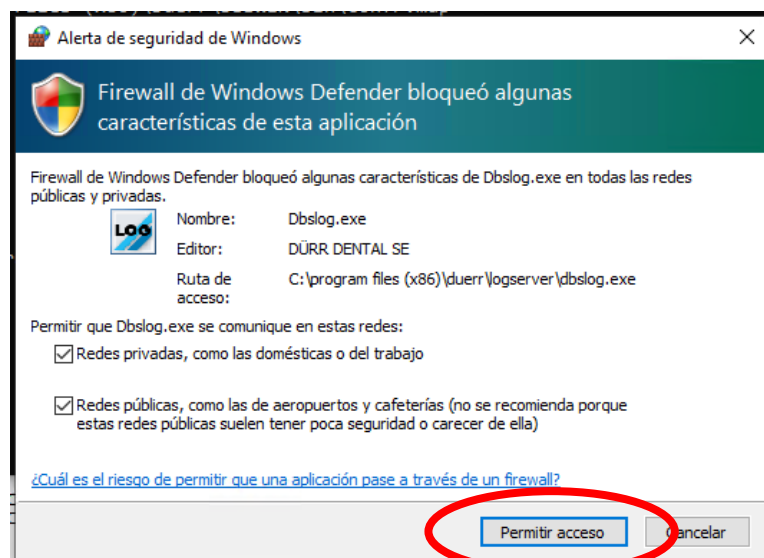


Una vez concluida la instalación, nos aparecerá esta ventana

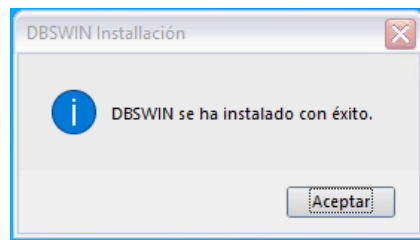


6. El Primer inicio

Abrimos el programa desde el acceso directo del escritorio

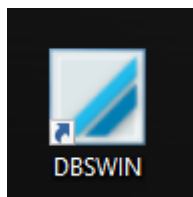


Al abrir nos pedirá registrar los módulos con esta ventana. En caso contrario diríjase al punto 7

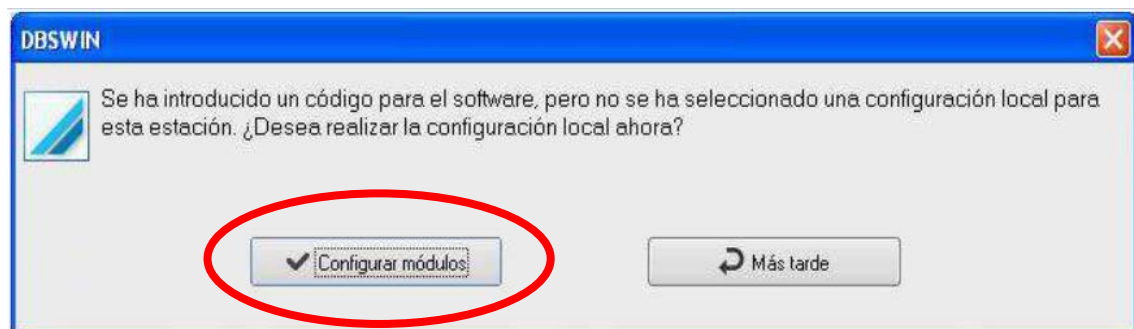

Al pulsar Configurar Módulos, nos muestra a una ventana dónde deberemos marcar todos los cuadros de los productos Dürr que hayamos adquirido



Al pulsar aceptar, nos guardará la configuración y nos pedirá reiniciar DBSWin

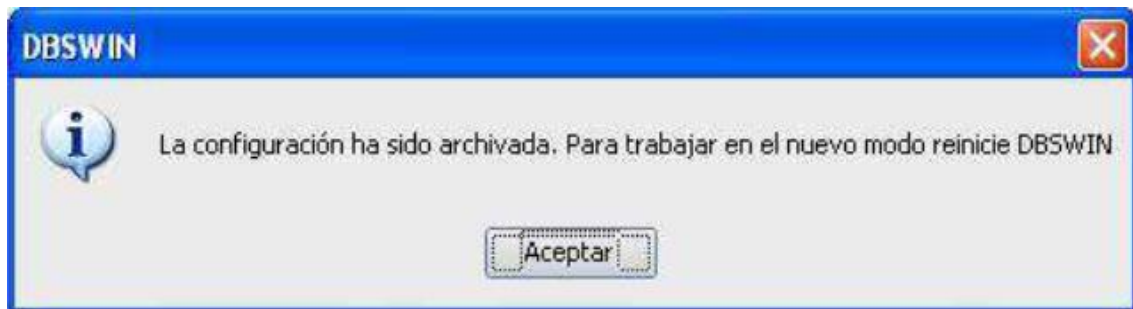


DBSWin ya está listo para ser usado.

Anexo

7. Instalaciones sin registrar

Cuando una instalación aún no se ha registrado, al abrir DBSWin, le aparecerá una ventana similar a esta:

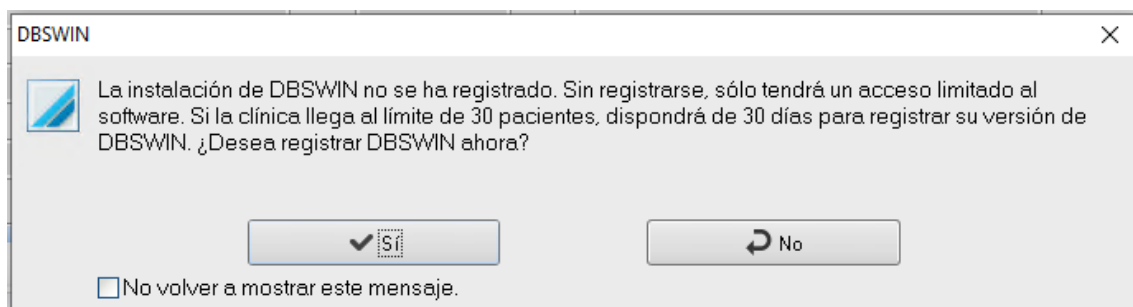

Si no han recibido instrucciones previas, deberán contactar con el servicio técnico de Dürr Dental

En caso de que no pueda llevar a cabo la instalación o necesite instalar un dispositivo, contacte con el servicio técnico de Dürr Dental

Teléfono de contacto:

Digital Service: +34 937188099

Póngase en contacto con su programa de gestión si necesita enlazarlo con DBSWin